

歩くことを
諦めたくない
すべての人へ

調節式歩行訓練車
リフトン ペーサー

ABILITIES
アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>



◀ダイナミック／標準車輪にロングアームサポート、マルチポジションサドルを装着。
※写真の仕様は実際と一部異なります。

僕、リハビリの時間が
すごく楽しみなんだ！
今日もこんなに歩いたよ！
ペーサーは歩行訓練に
革命をもたらします！





▲ダイナミック/大車輪にロングアームサポート、
胴支え、ヒップポジションスリング (パッド
付)、ハンドル、足首サポートを装着。




▶ S サイズ
※写真の仕様は実際と
一部異なります。

ペーサーがもたらした笑顔

リハビリって楽しいね！
明日はもっと遠くに行きたいな！
四千人のエビデンスを基に開発しました

歩行が困難な方にとって行きたいところへ歩いて行けることは、生活の質をガラリと変える大きな喜びです。そしてリハビリを続けることは、スムーズな日常生活への架け橋となります。「リフトン ペーサー」は多彩なオプションや機能により、さまざまな身体状況にフィット。より自由でより自然な動きで歩くことができ、「痛い」「つらい」「つまらない」がありません。



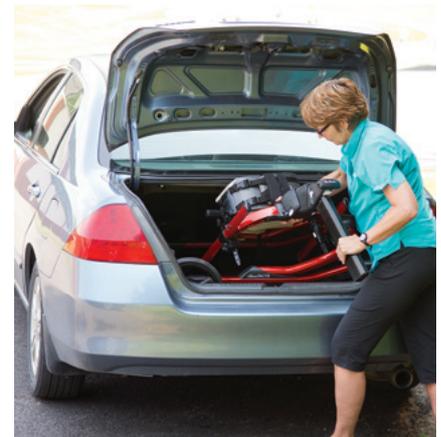

▲XSはそのままトランクに収まるコンパクトサイズ。S、M、L、XLは上部フレームと下部ベースに分割可能。他施設や外出先へ移動して使用することもできます。

これからの施設に求められるもの

お一人おひとりの身体状況に 対応する機器の活用で 多くの方を笑顔に

「リハビリが辛い」という声をよく耳にします。そんな方が使用しているのは、決まって調節機能のほとんどない機器。身体状況は人それぞれなのだから、本来はお一人おひとりに合わせて機器を選びたいもの。とは言っても、全員に1台ずつの機器を購入するのは現実的ではありません。

アビリティーズがご紹介する「リフトン ペーサー」は、4,000人の調査と研究に基づき開発された画期的な機器です。本体キャスターの調節や多彩なオプションとの組み合わせで、1台で数十台分以上のパフォーマンスを発揮。

お一人おひとりにオーダーメイドのようにフィットして、快適で楽しく有意義なリハビリを提供できます。

アビリティーズ基本理念

一人でも多くの方に 自分の足で歩く喜びを そして、自立と尊厳のある 共生社会の実現を

身体に障害があっても共に同じ街に住み、教育や働く機会を平等に得て、障害を理由として差別されない…そんな共生社会の実現をめざし、アビリティーズは1966（昭和41）年から50余年活動してきました。

1974（昭和49）年から事業を開始したリハビリテーション機器・福祉用具・病院用設備機器等の販売も活動の一つです。「自立と尊厳を大切に暮らすためのリハビリ機器」を提供し、多くの方に喜んでいただくことを私たちの基本理念と考えております。



柔軟性のあるシステム


1台のペーサーが オプションの装着や調節で まったく違う顔を見せます

大柄な方、小柄な方、ぽっちゃりした方、足の長い方…誰もが体格に合わせて服を選びます。けれど既成品では「肩幅に合わせたら袖丈が長かった」「ズボン丈が短すぎる」などよくあることです。

歩行訓練を必要とされる方は多岐にわたります。体格差はもとより、怪我をされた方、麻痺のある方、神経症状のある方など身体状況もさまざまです。

「リフトン ペーサー」の特長のひとつに、多彩なオプションを選択できることがあります。これらを装着することで、お一人おひとりの身体状況やニーズに対応。1台で数十台分以上のパフォーマンスを実現します。

例えばオプションを付け替えるだけで、この1台(Lサイズ)を多くの方が共有できます

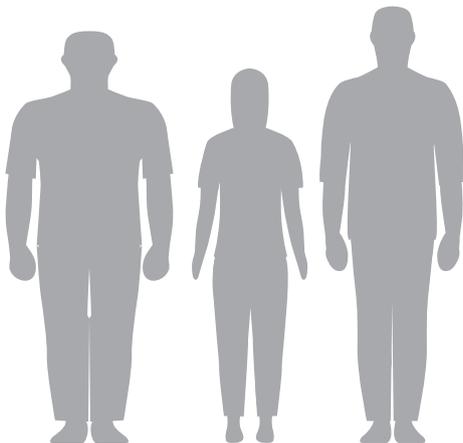

▲ダイナミック/標準車輪に、ロングアームサポート、マルチポジションサドルを装着。



◀このように上部フレーム開放側を正面にしてもお使いいただけます。比較的自由度の高い対象者におすすめの使用法です。

▼スタンダード/大車輪に、ハンドル付アームサポート、胸支え、ヒップポジションスリング (パッド付)、大腿サポートを装着。




下部ベース

標準車輪も、大車輪も、あなどれない！ 走行性能を支える4つの機能

標準車輪、屋外や絨毯も走行のしやすい大車輪ともに、4つの機能を搭載。歩行レベルや目標に応じて使い分けられ、さまざまなニーズに対応できます。

標準車輪

4輪すべてにキャスターロック、抵抗調節、旋回固定、後退防止機能付。

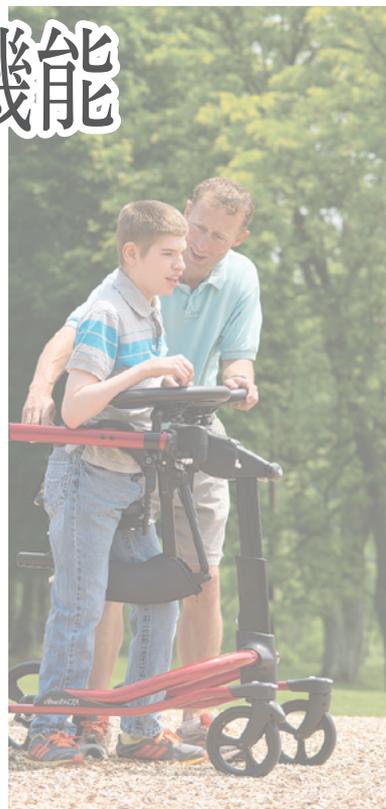

大車輪 (本体サイズ M、L のみ)

前輪に旋回固定機能、後輪にキャスターロック、抵抗調節、後退防止機能付。



上部フレーム

足だけで歩いてるわけじゃない! スムーズな重心移動には ダイナミックフレームを

本体サイズ S、M、L、XL は上部フレームをダイナミック、スタンダードの2種類から選べます。

ダイナミック

ダイナミック水平ロックとダイナミック垂直ロックをそれぞれ操作できます。
両方のロックをかければ、固定フレームとしてお使いいただけます。



▲ダイナミック水平ロック切替

水平ロックを解除すると左右方向に5cm動くようになります。ロックをかけるとセンター位置で固定されます。

▲ダイナミック垂直ロック切替

垂直ロックを解除すると上下方向に5cm動くようになります。ロックをかけると一番高い位置で固定されます。

スタンダード

固定フレームでの訓練を必要とされる方、フレームの動きを必要とされない方に。

マルチポジションサドル

このサドルは足を繰り出しやすくなる魔法のサドルです

腰部・臀部に微細なポジショニングを必要とされる方に。サドルの高さ、前後、角度など細かく調節できます。※ S、M、L、XL の上部フレームに取付けられます。



腰周りの調節範囲

高さ 8cm、奥行 8cm L 用
高さ 5cm、奥行 8cm S 用



サドル高さ調節範囲

高さ 21cm L 用
高さ 14cm S 用



サドル前後調節範囲

奥行 13cm L 用
奥行 10cm S 用



サドル角度調節範囲

前後 3 段階



◀マルチポジションサドルによる移乗

車いすからの移乗もマルチポジションサドルと2人以上の介助者によって、このように安全・簡単にできます。



▼あらかじめサドルを逆に付け替えることで、上部フレーム開放側を正面にしてもお使いいただけます。



多彩なオプション

手



ハンドル付アームサポート (S) (L)

高さ、奥行、角度、ハンドルの位置など細かく調節できます。



ロングアームサポート

大きなパッド面に身体を預けて、臀部へ肘掛けとしても安楽です。

胴



胴支え (S) (M) (L)

上体を保持し、15度刻みで前後に調節できます。



座



マルチポジションサドル (S) (M) (L)

腰部・臀部に微細なポジショニングを必要とされる方に。サドルの高さ、奥行、角度など細かく調節できます。



膝



大腿サポート (S) (L)

挟み足の防止に。※マルチポジションサドルとの併用はできません。



足首



**足首サポート (XS用) (S用) (標準車輪 M用)
(標準車輪 L・XL用) (大車輪 M用) (大車輪 L用)**

足の可動域や方向性を制限します。



▲大車輪用

▲標準車輪用



かかる荷重を分散できます。



ハンドループ (1本) (2本1組)
 ループのどこでも握れます。径が細めなので、お子様や手の小さな方にも。



ハンドル

ヒップポジショナー sling、ヒップサポート sling の取付に必要です。介助者用または対象者用ハンドルとしても。



ヒップポジショナー sling (パッド付) (S) (L)
 臀部に多少のポジショニングが必要な方に。※別途ハンドルが必要です。



ヒップサポート sling (S) (M) (L)
 臀部に支えが必要な方に。※別途ハンドルが必要です。



他



▲ XS 用




▲ S・M・L・XL 用

コミュニケーショントレイ (XS 用) (S・M・L・XL 用)
 スマホやタブレットなどを載せて。※トレイの耐荷重は 4.5kg です。



ガイドバー (XS 用) (S 用) (M・L 用)
 介助者が対象者を誘導するときに。

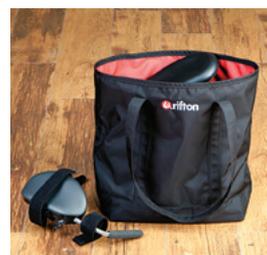

トートバッグ
 オプションの移動や保管に。



How To Choose

ペーサーの組み合わせは無限大!

- 1** 対象者の体重および肘から床までの垂直距離により、本体サイズをXS、S、M、L、XLから選びます。お子様の場合は成長も考慮してお選びください。

サイズ	XS	S	M	L	XL
最大荷重 (kg)	23	34	68	91	113
肘～床の高さ (cm)	39～52	47～70	61～89	81～119	86～124

立位で腕を真っ直ぐに下ろし、肘を90度に曲げます。肘から床までの垂直距離を測定します (右図参照)。




- 2** M、Lは、下部ベースを標準車輪、大車輪から選びます (⇒ p.8 参照)。XS、S、XLは標準車輪のみとなります。S、M、L、XLは、上部フレームをダイナミック、スタンダードから選びます (⇒ p.9 参照)。

- 3** 対象者の身体状況により、使用するオプションの種類とサイズを決定します (⇒ p.12～13、15 参照)。お子様の場合は成長も考慮してお選びください。

- 4** 歩行訓練器に身体を合わせるのではなく、対象者の身体に合わせた歩行訓練器の出来上がりです!

カラーバリエーション

XS、S、M、L、XL : ライム、ピンク、レッド、ブルー、グレイ

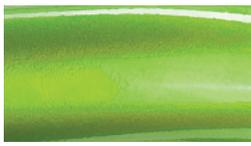

ライム



ピンク



レッド



ブルー



グレイ

オプション適合表

■ は組み合わせできません

			本体												
			XS	S	M		L		XL						
					標準車輪	大車輪	標準車輪	大車輪		標準車輪					
オプション	手	ハンドル付アームサポート	S												
			L												
		ロングアームサポート													
		ハンドループ													
		ハンドル													
	胸	胸支え	S												
			M												
			L												
	座	マルチポジションサドル	S												
			M												
			L												
		ヒップポジションナースリング (パッド付) (別途ハンドルが必要です)	S												
			L												
			S												
	ヒップサポートスリング (別途ハンドルが必要です)	M													
		L													
		S													
	膝	大腿サポート	L												
			S												
	足首	足首サポート	XS用												
S用															
標準車輪 M用															
大車輪 M用															
標準車輪 L・XL用															
大車輪 L用															
その他	コミュニケーショントレイ	XS用													
		S・M・L・XL用													
	ガイドバー	XS													
		S用													
	M・L用														

製品仕様

本体サイズ		XS		S				M				L				XL	
下部ベース				標準車輪		標準車輪		大車輪		標準車輪		大車輪		標準車輪			
上部フレーム				スタン	ダイナ	スタン	ダイナ	スタン	ダイナ	スタン	ダイナ	スタン	ダイナ	スタン	ダイナ		
寸法	全幅 (cm)	52	58	66	76	71	81	80									
	全長 (cm)	57	66	76	91	91	103	101									
	全高 (cm)	32	41 ~ 53	55 ~ 69				72 ~ 98				79 ~ 104					
ベース高 (cm)		—	28	37				41				47					
ダイナミック垂直可動 (cm)		—	—	3.5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	—	5		
ダイナミック水平可動 (cm)		—	—	4	—	5	—	5	—	5	—	5	—	—	5		
自重 (kg)		4.6	7.9	8.6	10.2	12	11.8	13.6	11.3	13.0	13.0	14.7	15.0	16.8			
材質		アルミ、ステンレス															

お問い合わせ・ご注文は



(無料通話) やさしいようぐを
0120-834490



(無料FAX)
0120-834460

(お近くの営業所につながります)

営業所一覧

本社	TEL03-5388-7200	FAX03-5388-7502	〒 151-0053	東京都渋谷区代々木 4-30-3 新宿ミッドウエストビル
札幌出張所	TEL011-520-1092	FAX011-520-1093	〒 064-0918	北海道札幌市中央区南18条西8丁目1-12 寿嶺荘1F B号室
仙台営業所	TEL022-287-0821	FAX022-287-0823	〒 984-0003	宮城県仙台市若林区六丁の目北町10-64
とちぎ営業所	TEL0282-29-1025	FAX0282-28-0262	〒 328-0027	栃木県栃木市今泉町1-5-11
さいたま営業所	TEL048-498-6460	FAX048-240-0301	〒 332-0023	埼玉県川口市飯塚 3-8-17 気まま館川口 1F
東京東営業所	TEL03-5672-1510	FAX03-5672-1502	〒 125-0063	東京都葛飾区白鳥 1-8-10
吉祥寺営業所	TEL0422-68-5800	FAX0422-68-5801	〒 180-0004	東京都武蔵野市吉祥寺本町3-22-11 エーアイパレス吉祥寺2F
八王子営業所	TEL042-696-5441	FAX042-691-8008	〒 192-0023	東京都八王子市久保山町1-9-154
千葉営業所	TEL043-382-3441	FAX043-228-5805	〒 266-0002	千葉県千葉市緑区平山町 477-1
千葉東葛営業所	TEL047-429-6215	FAX047-429-6219	〒 273-0048	千葉県船橋市丸山5-30-3 第6松宮ビル1F
横浜営業所	TEL045-250-4350	FAX045-250-4352	〒 232-0024	神奈川県横浜市南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設12F
奈良北・町田営業所	TEL045-960-1736	FAX045-960-1728	〒 227-0036	神奈川県横浜市青葉区奈良町2913 奈良北団地1号棟108号
湘南営業所	TEL0463-37-3123	FAX0463-37-3421	〒 254-0914	神奈川県平塚市高村 203 平塚高村団地 14-101
松本営業所	TEL0263-25-0761	FAX0263-25-0716	〒 399-0005	長野県松本市野溝木工 1-9-34
佐久出張所	TEL0267-64-6070	FAX0267-62-2933	〒 385-0051	長野県佐久市中込石神 664-1
名古屋営業所	TEL052-758-5011	FAX052-758-5033	〒 463-0067	愛知県名古屋市守山区守山 3-11-28
新潟営業所	TEL025-279-5611	FAX025-279-5615	〒 950-0813	新潟県新潟市東区大形本町3-2-35
金沢営業所	TEL076-292-9455	FAX076-292-9454	〒 921-8005	石川県金沢市間明町2-108
大阪営業所	TEL06-6786-5311	FAX06-6786-5310	〒 536-0007	大阪府大阪市城東区成育 2-16-15
泉州営業所	TEL0725-47-1151	FAX0725-47-1131	〒 594-0071	大阪府和泉市府中町6-11-19
阪神営業所	TEL0798-37-1971	FAX0798-37-1972	〒 663-8243	兵庫県西宮市津門大筒町 4-10 安田ビルⅡ号館 1階
広島営業所	TEL082-850-3622	FAX082-875-7971	〒 731-0113	広島県広島市安佐南区西原9-6-10
福山営業所	TEL084-946-5418	FAX084-946-5488	〒 721-0942	広島県福山市引野町4-1-13
北九州営業所	TEL093-522-4600	FAX093-522-4605	〒 802-0021	福岡県北九州市小倉北区高浜1-6-27
福岡営業所	TEL092-624-6460	FAX092-624-6455	〒 812-0068	福岡県福岡市東区社領1-12-4
台湾事業所 優能福祉股份有限公司	TEL +886-2-2581-1648 FAX +886-2-2581-1649		10442	台湾 台北市中山區長安東路一段18號8F之6

一級建築士事務所 バリアフリー設計建築研究所

各種建築物のバリアフリー化のご相談をお受けしています。(相談無料)。

TEL03-5388-7515 E-mail barrier_free@abilities.jp

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 4-30-3 新宿ミッドウエストビル

ショールーム

※見学は予約制です。電話にてお申し込みください。

本社ショールーム	TEL03-5388-7200	〒 151-0053	東京都渋谷区代々木 4-30-3 新宿ミッドウエストビル
川崎バリアフリーショールーム	TEL044-329-1565	〒 210-0855	神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1-13
松本ショールーム	TEL0263-25-0761	〒 399-0005	長野県松本市野溝木工 1-9-34
金沢ショールーム	TEL076-292-9455	〒 921-8005	石川県金沢市間明町 2-108
大阪城東ショールーム	TEL06-6786-5311	〒 536-0007	大阪府大阪市城東区成育 2-16-15
大阪和泉ショールーム	TEL0725-47-1151	〒 594-0071	大阪府和泉市府中町 6-11-19
西宮ショールーム	TEL0798-37-1971	〒 663-8243	兵庫県西宮市津門大筒町 4-10 安田ビルⅡ号館 1階
広島ショールーム	TEL082-850-3622	〒 731-0113	広島県広島市安佐南区西原 9-6-10