

みんなが「かっこいい!」って  
毎日使うのが楽しみ

**ABILITIES**  
アビリティーズ  
<https://www.abilities.jp/>

## トイレ&シャワー用チェアユニット リフトン HTS

スムーズな排泄が健康を支える

日々の暮らしの中で、排泄は健康に関わる大事な日常の一部です。

HTS は理想的な排泄姿勢が取れるトイレユニット。背もたれを前傾させて、フットボードに足の裏をしっかりと付けると、スムーズな排泄姿勢がとれます。

1台で3通りのトイレの使い方が可能で、シャワーチェアとしても使えます。



リフトン HTS 推奨セット

コモードチェアとして



単体で



便器に重ねて

# 1台で4通りに使える、 革新的トイレユニット

HTS はすべてのパーツが取り外せるので、お手入れがしやすく衛生的。ほとんどのトイレに設置可能で、「単体で」「便器に重ねて」「便器に固定して」の3通りの使い分けができます。

シャワーチェアとして



推奨セットは前傾5°まで、後傾25°までの傾きが可能なティルト機能付きなので、シャワー浴や移乗も容易に行なえます。




推奨セット  
キャスターベース A (ティルト機能付)、便槽付




便器に固定して

[ティルト・リクライニング機能]


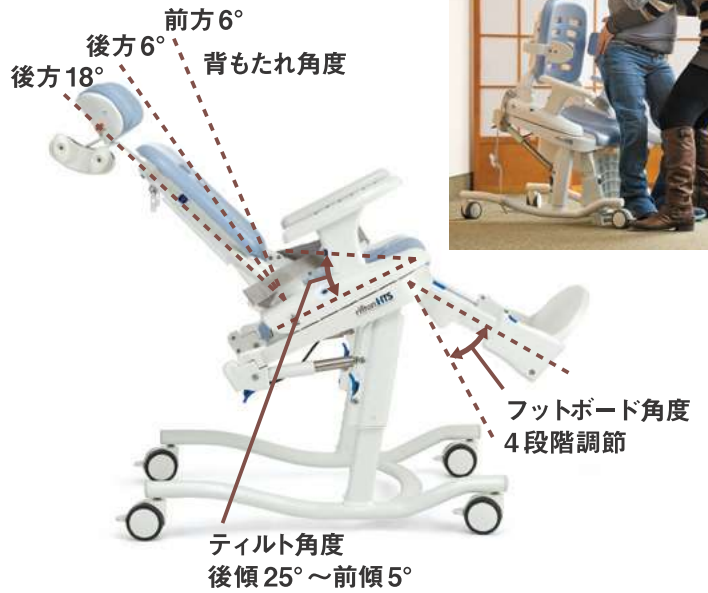


オプション

\*組立・分解・調整がすべて工具なしで可能です。

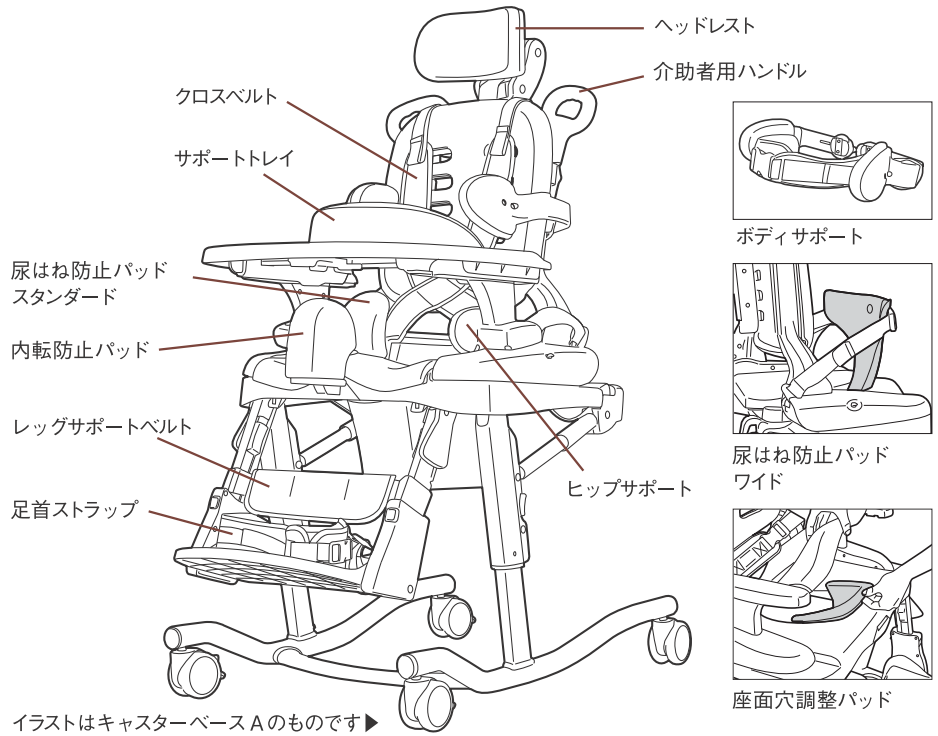

イラストはキャスターベースAのものです▶

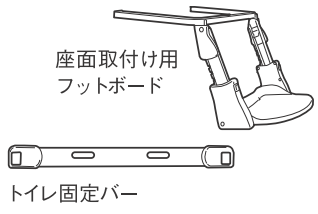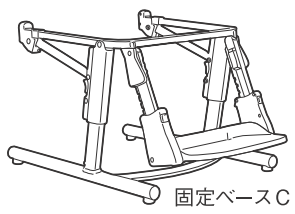



# どちらのチェアが 大きいでしょうか？

写真の2台は同じMサイズです。片方は最小の設定に、もう片方は最大の設定にして、それぞれ5歳と11歳のお子様が座っています。HTSは成長するお子様に合わせて多様な調整が可能です。

## 適合表／製品仕様

|                                  |                         | S                                  | M            | L            |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 最大荷重※ (kg)                       |                         | 34                                 | 68           | 113※         |
| 適応身長 (cm)                        |                         | 76 ~ 117                           | 107 ~ 142    | 127 ~ 188    |
| ベースA<br>(ティルト・フットボード・<br>キャスター付) | 幅 (cm)                  | 53                                 | 53           | 57           |
|                                  | 奥行 (cm)                 | 79                                 | 79           | 86           |
| 全高 (cm)                          |                         | 高さ調節やティルト、リクライニングにより変わります。         |              |              |
| 座面                               | 床からの前座面高 (cm)           | 39 ~ 55                            | 39 ~ 55      | 44 ~ 58      |
|                                  | フットボードからの前座面高 (cm)      | 22 ~ 34                            | 27 ~ 39      | 34 ~ 44      |
|                                  | 幅 (cm)                  | 20 / 25 / 30                       | 25 / 30 / 36 | 33 / 38 / 43 |
|                                  | 奥行 (cm)                 | 20 ~ 28                            | 29 ~ 37      | 37 ~ 44      |
|                                  | 穴の大きさ (オープン型) 幅×奥行 (cm) | 10×23                              | 11×30        | 15×36        |
|                                  | 穴の大きさ (穴付き型) 幅×奥行 (cm)  | 8×20                               | 9×25         | 11×30        |
| アームレスト高 (cm)                     |                         | 13.5                               | 17           | 20           |
| 背もたれ                             | 幅 (cm)                  | 29                                 | 34           | 41           |
|                                  | 座面からの高さ (cm)            | 42                                 | 50           | 62           |
| 背もたれ角度調節 (度)                     |                         | 前方6 / 後方6・18                       |              |              |
| ティルト角度 (度)                       |                         | 前方5 ~ 後方25                         |              |              |
| 自重                               |                         | 15.2kg                             | 16.1kg       | 20.5kg       |
| 材質                               |                         | アルミ、ステンレススチール、ポリウレタン、EVA樹脂、ポリプロピレン |              |              |

※Lサイズのフットボードの最大荷重は68kgです。

**ABILITIES アビリティーズ**  
<https://www.abilities.jp/>  
 (無料通話) やさしいようぐを  
**0120-834490**  
 お近くの当社営業所につながります

アビリティーズ・ケアネット株式会社  
 [本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

[営業所] 札幌市 / 仙台市 / 栃木市 / 川口市 / 渋谷区 / 葛飾区 / 武蔵野市 / 八王子市 / 千葉市 / 船橋市 / 横浜市南区 / 横浜市青葉区 / 平塚市 / 松本市 / 佐久市 / 名古屋市 / 新潟市 / 金沢市 / 大阪市 / 和泉市 / 西宮市 / 福山市 / 広島市 / 北九州市 / 福岡市 / 台北市 (台湾)

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。  
 ※掲載価格には消費税は含まれておりません。 ※このチラシの記載内容は2019年9月のものです。 ※禁無断転載・複写