

グルドマン 天井走行リフト設置例



神奈川県障害者施設



兵庫県高齢者施設



山梨県高齢者施設



山梨県高齢者施設

**職場定着
支援助成金
対象品**

介護労働者の労働環境向上のために、リフト等の福祉機器の導入を補助する助成制度です。

**要施工
工事費別途**

取付工事費、諸経費は別途申し受けます。

ABILITIES アビリティーズ
http://www.abilities.jp/

フリーコール (無料通話) やさしいようぐを
0120-834490

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
※掲載価格には消費税は含まれておりません。 ※このチラシの記載内容は2015年9月のものです。 ※禁無断転載・複写

15-09-012.SG.0005

天井走行リフトシステムで 安全・快適なケアを

2015年
10月版

福祉用具の活用で自立支援、
安全・安心な介護の実現

ABILITIES
アビリティーズ
創業50周年 Since 1966



**職場定着
支援助成金
対象品**

Guldmann グルドマン社



安全性、快適さ、効率に考慮し、様々な場面で、人を持ち上げ、移動し、ポジショニングするデンマークの機器を提供しています。天井走行リフトシステム、スリングなど幅広く製品を開発・製造しています。

天井走行リフト 病院・福祉施設で設置が拡大しています。安心なトランスファー、腰痛予防に！

最大荷重 200kg のパワフルリフト 天井走行リフト GH3

要施工
工事費別途

職場定着
支援助成金
対象品



商品番号	種別
7290-00	手動走行
7291-10	手動走行リモコン付
7293-00	電動走行
7294-10	電動走行リモコン付
7287-40	リフティングハンガー 小 (全幅 487mm)
7287-41	リフティングハンガー 大 (全幅 576mm)

※レール、リフティングハンガー、スリングシートは別売りです。



ワイヤレスリモコン (リモコン付機種付属)
リモコン付機種は、有線手元スイッチ、ワイヤレスリモコンのいずれかで操作できます。ワイヤレスリモコンで、電動レールシステムの操作も可能です。

患者の安静、安全を保って移乗、移動できます。

- レールの広い範囲から充電できます。
- 昇降スピードがアップ (荷重毎分 2.4m、無荷重毎分 6.0m)。スムーズなケアに役立ちます。
- バッテリー方式で 2 時間で充電。
- グルドマン社レールシステムとともにご利用ください。

安全機構

- 上昇下降リミットスイッチ
- 緊急停止装置
- 緊急下降装置
- 上昇時ねじれ巻き込み防止装置
- 無負荷感知ロック機構
- オートパワーオフ機能
- スロースタート機能

●サイズ/幅 345 × 奥行 205 × 高さ 156mm ●自重/手動走行本体 9.6kg、電動走行本体 10.5kg ●最大荷重/ 200kg ●ストローク/ 2,500mm ●上昇速度/ 毎分 2,400mm (85kg 負荷時) 毎分 6,000mm (無負荷時) ●バッテリー/ 24V × 1 個

※スリングシートは使用する方の状態に合わせてお選びください。P6～7 をご参照ください。

スタンダードタイプと、 取り外し可能なポータブルリフトの 2 種類 天井走行リフト GH1 / GH1Q

要施工
工事費別途

職場定着
支援助成金
対象品



寝室・トイレなど、室内をスムーズに移動できます。



GH1


商品番号	種別
7158-10	GH1Q ポータブル手動走行
7152-10	GH1 手動走行

※リフティングハンガー、スリングシートは GH3 と共通です。
※レール、リフティングハンガー、スリングシートは別売りです。
※コンビロックシステム、トラックスイッチは使用できません。

- 手元スイッチを充電ホルダーに接続して、確実に充電します。
- 昇降スピード：荷重毎分 2.4m、無荷重毎分 4.8m。スムーズなケアに役立ちます。
- GH1Q は、ポータブルタイプ。工具を使わずに取り付け、取り外しができるクイックリリース方式で、移動が簡単です (トロリーの追加が必要です)。



充電時

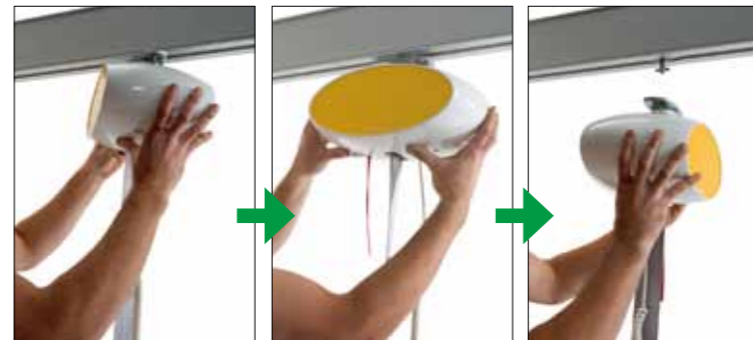

GH1Q

- バッテリー方式で 3 時間で充電。
- グルドマン社レールシステムとともにご利用ください。
- 側面カバーは黄色と白色の 2 種類。




安全機構

- 上昇下降リミットスイッチ
- 緊急停止装置
- 緊急下降装置
- 上昇時ねじれ巻き込み防止装置
- 無負荷感知ロック機構
- オートパワーオフ機能
- スロースタート機能

●寸法/幅 350 × 奥行 194 × 高さ 156mm ●自重/ 8.0kg ●最大荷重/ 175kg ●ストローク/ 2,500mm ●上昇速度/ 毎分 2,400mm (85kg 負荷時)、毎分 4,800mm (無負荷時) ●バッテリー/ 24V × 1 個

レールが動く、接続する

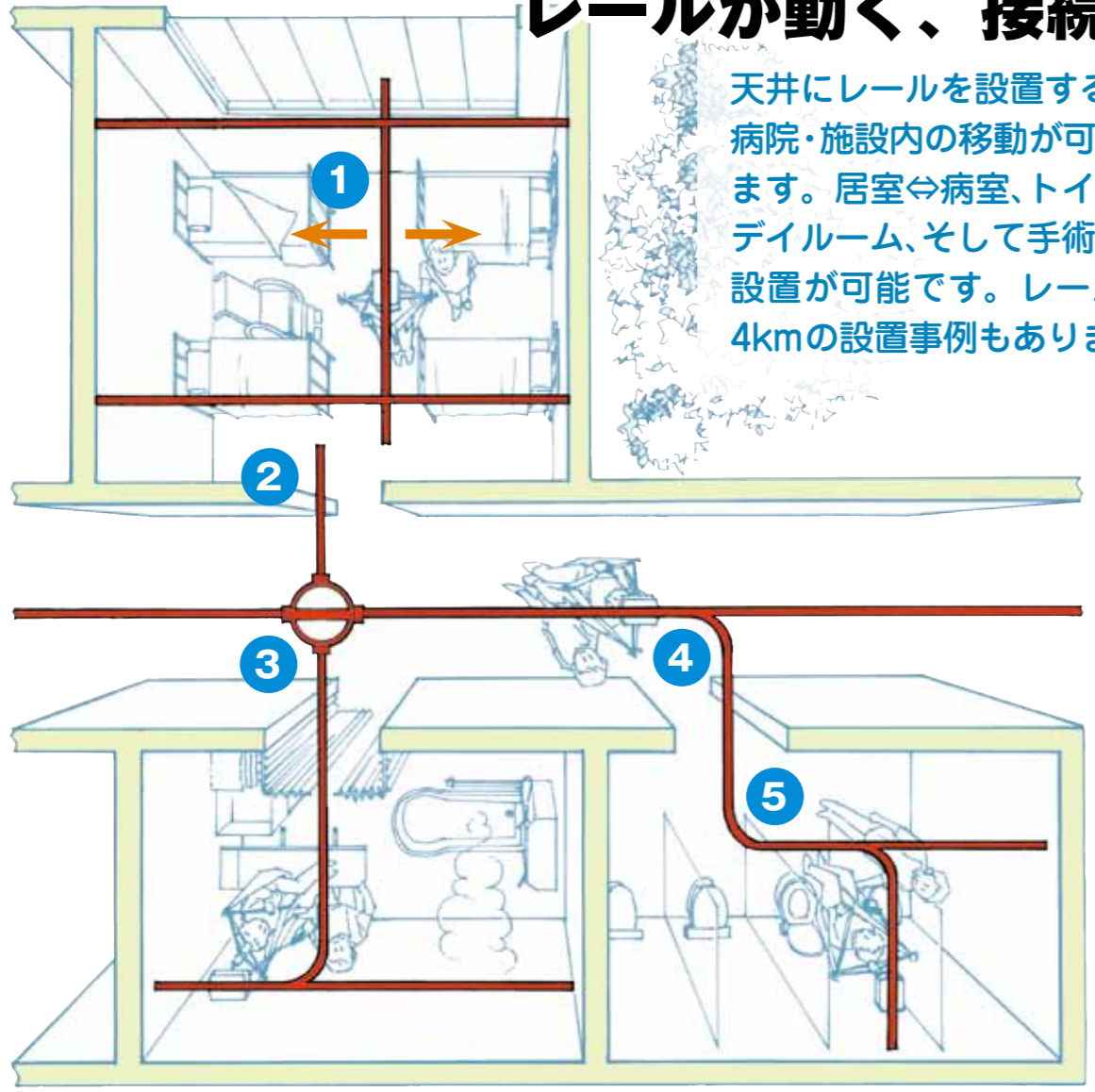

天井にレールを設置することで、病院・施設内の移動が可能となります。居室⇄病室、トイレ、浴室、デイルーム、そして手術室までも設置が可能です。レール全長約4kmの設置事例もあります。

① 室内どこでも移動 ルームカバリングシステム

レール自体が左右に移動し、リフトの前後移動との組み合わせでお部屋全体をカバー。固定レールだけのレイアウトに比べてはるかに便利で、介護の省力化や自立度を確実に上げるシステムです。



③ 狭い場所での方向転換 ターンテーブル

電動で回転し、行きたい方向が選べます。設置にスペースを取らず、例えば廊下での方向転換、脱衣場から浴室へ、トイレが左右振り分けになっている場合などに便利です。



※通常は有線スイッチです。ワイヤレスリモコン（オプション）による操作も可能です。


② お部屋からお部屋へ コンビロックシステム

部屋内の移動レールと、他の部屋へのレールの接続を可能にしたのが独自の「コンビロックシステム」です。レールが正確に接続されたときにだけストッパーが解除される安全装置付き。



④ レールを2方向に切替 トラックスイッチ

もっとも多く使われる分岐方法です。リフトを使用する場所により、90度曲がる方向にスイッチで切り替えます。リフトを使用されるご本人にも操作できます。

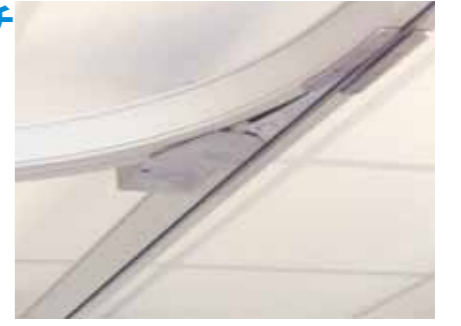

※通常は有線スイッチです。ワイヤレスリモコン（オプション）による操作も可能です。

⑤ スペースに合わせて カーブレール

30度、45度、60度、90度のレール角度を選ぶことができます。



組立式の据え置き型レール（工事不要） 寸法調整可能。ご利用者に合わせて居室／病室間を移動できます

自立型 A フレーム

■使う場所に合わせて高さと幅を調節できます。

商品番号 7201-20

●寸法／高さ 2020～2820 × 幅 2720～3890mm ●最大荷重／250kg ●総重量／52kg ●材質／アルミニウム、スチール
※リフト本体、ハンガー、吊り具は別売りです。
※リフト本体は、GH3、GH1、GH1Qのいずれかをご利用ください。



自立型 H フレーム

- レールの下をリフトが面状に移動します。
- レールの高さを調節して、お部屋にあわせて使用できます。

商品番号	種別
7201-03	3 × 3m
7201-04	4 × 4m

●寸法／3 × 3m：高さ 2440～2840 × 幅 3200 × 奥行 3200mm、4 × 4m：高さ 2440～2840 × 幅 4200 × 奥行 4200mm ●最大荷重／255kg ●総重量／3 × 3m：151kg、4 × 4m：178kg ●材質／アルミニウム、スチール
※一部仕様が画像とは異なります。
※リフト本体、ハンガー、吊り具は別売りです。
※3m、4mのレールをカットして必要な寸法に合わせることができます。
※リフト本体は、GH3、GH1、GH1Qのいずれかをご利用ください。



グルドマン スリングシート リフトの効率的な活用はスリング の選択がカギです

リフトの性能は、使用する方の体格や症状にあったシートがあってこそ発揮されます。

用途や状況に合わせて最適なシートをお選びください。

スリングシート選定のポイント

- ①ご本人の身体の状態を正確に把握すること
 - ②移動、排泄、入浴などの目的と使用場所を明確にすること
 - ③ご本人に合ったサイズを選ぶこと
- 筋肉の状態は？ ●硬直はありますか？ ●上肢のコントロールはできますか？

グルドマン スリングシート サイズ適応表

サイズ	座高	座幅
XS	50～82cm	33～37cm
S	80～87cm	36～40cm
M	85～92cm	39～43cm
L	90～97cm	42～46cm
XL	95～102cm	45～49cm
XXL		48～52cm

※商品によって、一部仕様が写真と異なる場合があります。
※XL、XXLについてはお問い合わせください。

スタンダードタイプ ベーシック

■背当ては肩くらいまで、お尻はあまり露出しない。

主な対象者

首や上肢をコントロールできる方。

主な用途

座位から座位へのリフティング全般。



商品番号	種別	商品番号	種別
7302-54	XS	7305-00	ネットXS
7302-55	S	7305-01	ネットS
7302-56	M	7305-02	ネットM
7302-57	L	7305-03	ネットL

●材質/ポリエステル、パッド: ポリエチレンフォーム ●最大荷重/255kg
※頭部のサポートが必要な方はご使用になれません。

頭部のサポートが必要な方に

ベーシック・ハイ



■背当てが頭部まである。お尻はあまり露出しない。

主な対象者

首や上肢をコントロール、保持できない方。

主な用途

座位から座位へのリフティング全般、横になった状態からのリフティング。

商品番号	種別	商品番号	種別
7302-62	XS	7305-04	ネットXS
7302-63	S	7305-05	ネットS
7302-64	M	7305-06	ネットM
7302-65	L	7305-07	ネットL

●材質/ポリエステル、パッド: ポリエチレンフォーム ●最大荷重/255kg

体幹保持のできる方に

ベーシック・ロー

■背当ては肩甲骨の下くらいまで、お尻はあまり露出しない。

主な対象者

首や上肢をコントロールできる方。

主な用途

座位から座位へのリフティング全般。



●材質/ポリエステル、パッド: ポリエチレンフォーム ●最大荷重/255kg

※頭部のサポートが必要な方はご使用になれません。

商品番号	種別	商品番号	種別
7302-70	XS	7305-08	ネットXS
7302-71	S	7305-09	ネットS
7302-72	M	7305-10	ネットM
7302-73	L	7305-11	ネットL

リフティングしたまま

ズボンが脱げます アクティブプラス2

■背当ては肩甲骨の下くらいまで。胸部で体幹を保持する。

主な対象者

股関節を保持できる方。簡単に装着できる吊り具をご希望の方。

主な用途

トイレへの移動。



商品番号	種別
7302-50	XS
7302-51	S
7302-52	M
7302-53	L

●材質/ポリエステル ●最大荷重/255kg

大腿部のサポートが大きく、ハンモックのような安心感 ベーシック・ハンモック



商品番号 7304-50

●材質/ポリエステル ●最大荷重/255kg
※頭部のサポートが必要な方は、ヘッドサポートを合わせてご利用ください。

脚をそろえて座るタイプ。 やわらかく通気性のよい素材です シットオン・コンフォート・ハイ



商品番号 7304-60

●材質/ポリエステル ●最大荷重/255kg

シートが交差しないで大腿部の外側を通り、浴衣やガウン着用時でも使用できます 下肢切断者用



商品番号	種別
7301-80	S
7301-81	M
7301-82	L

●材質/ポリエステル ●最大荷重/255kg

スリングシート用ヘッドサポート

●材質/ポリエステル

商品番号 7301-36

移乗だけでなく、リハビリやケアの場面でも活躍しています

リフティングベスト

■立位サポートの専用スリングシートをご用意。

■リフトのサポートで転倒を予防し、立位・歩行訓練に最適。



商品番号	種別
7301-37	S
7301-38	M
7301-39	L

●材質/ポリエステル ●最大荷重/255kg

1人のスタッフで安全に背～腰部のケアができます

ターナー (シングル)

■側臥位への体位変換を行なえます。

商品番号 7302-80

●材質/ポリエステル



ターナー (ツイン)

■両側に側臥位を取ることができます。

商品番号 7302-81

●材質/ポリエステル



フットケアに

レッグスリング

商品番号 7302-82

●材質/ポリエステル

