

フィットして、安定する！マーブルクッションにニューラインナップ M·able(マーブル)クッションQ・U 清拭タイプ



M·able(マーブルクッション)は、特殊なビーズとパイプを独自の割合で配合することで、体に合わせてクッションが変形し、体重が乗ると安定して形がピタッと決まるのが特長です。中材は自由に動かせるため、使用者の状態に合わせた調整も簡単です。体位変換を容易にしながら、安定性が高いため筋肉をしっかり休ませることができ、拘縮ケアや床ずれケアにも効果的なクッションです。

Q



Q使用方法動画


Q: 上半身の屈曲が強い方、体にねじれがある方に



背中が大き目な突出もクッションが変形してフィットしますので、仰臥位が安定しやすくなります。




左右の中材の量を変えることで、左右の高さを変えることができ、体にねじれがある方でも安定する姿勢を作り、筋緊張を下げます。

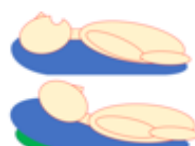

クッションの裏側に付属する「クロワッサンバッグ」の働きにより、頭頂部が沈み込みあごが上がりが口が開くのを防ぎます。

U

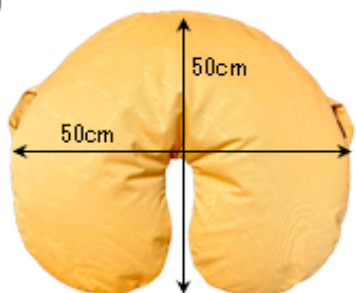

U使用方法動画

U: 屈曲が軽度な方、腕や脚など曲がる部位に



上半身を硬くしない、円背を作らない、頸部を反り返らせない、開口が気になり始めた、肩とマットレスに隙間ができたなど、各種予防のために使うのに適した形状とボリュームです。



腕や脚のように曲がる部位に合わせてやすい形状とサイズです。

ヒトラボ

レンタルコード	タイプ	メーカー品番	TAISコード	月額レンタル	利用者負担			
					1割	2割	3割	
G062	Q	MC-Q	01908-000035	体位変換器	¥2,500	¥250	¥500	¥750
G063	U	MC-U	01908-000036	体位変換器	¥2,500	¥250	¥500	¥750

●材質/カバー: ポリエステル、綿、ナイロン 中材: ポリプロピレン、ポリエチレン

ティルトリクライニング車いすでもっと“リラックス”を！

M·able(マーブル)クッション T



車いすで、脚が窮屈でリラックスできない方へ

車いすの脚部の構造は、空間が多く、使用者の脚が安定せずリラックスできないケースが多く見られます。マーブルクッションTは、使用者の脚を広い面積でソフトに受け止め、リラックスできる姿勢を促します。特にティルトリクライニング車いすのエレベータリングに最適です。



車いすへのセット方法

座面に「面ストッパー」を敷き、その上から座面クッションを設置します。必要に応じて裏面の「固定ベルト」をフレームに取り付けてください。



T使用方法動画

ヒトラボ

レンタルコード	タイプ	メーカー品番	TAISコード		月額レンタル	利用者負担		
						1割	2割	3割
C278	T	MC-T	01908-000037	車いす付属品	¥1,500	¥150	¥300	¥450

●材質/カバー: ポリエステル、綿、ナイロン 中材: ポリプロピレン

製品のお求め・お問い合わせは

ABILITIES アビリティーズ・ケアネット株式会社

<https://www.abilities.jp/>

フリーコール (無料通話) やさしいようぐを **0120-834490**

FAXフリーコール (無料FAX) **0120-834460**

[本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

[営業所] 札幌市/仙台市/栃木市/川口市/渋谷区/葛飾区/武蔵野市/八王子市/船橋市/横浜市/平塚市/松本市/名古屋市/新潟市/金沢市/大阪市/和泉市/西宮市/広島市/福山市/北九州市/福岡市