

利用者にも介護する方にもやさしい 体圧分散エアマットレス

SRアクティブマットレス
体圧ボンさん

SRセンサが
体圧の高い
箇所を察知し、
ピンポイントに
除圧します。



利用者や介護する方々にとってもやさしい3つの特長!!

1 利用者の寝姿勢に
最適なマットレス形状を
提供します。

センサが体圧の高いところを
察知して、寝姿勢に最適な状態に
マットレスが自動的に
変形します。

2 利用者の眠りを
妨げません。

最適状態に変形後は
30分間静止するため
船酔い感が軽減されます。

3 誰でも簡単に
利用できます。

3本のチューブをポンプに接続、
電源ONで動作開始、
体重設定は不要です。

利用者を見守る3つのやさしいモード


見守りモード

体圧変化を常に観察し、利用者を見守ります。
30分経過または寝返り検知で
体圧分散モードに移行します。




体圧分散モード

体圧分布を計測し、エアセルを膨張・収縮。
圧力集中を緩和します。
動作後は自動で見守りモードに移行します。

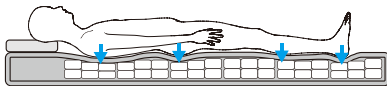

背上げモード

背上げや離床時に身体をしっかり支えるモードです。
体圧分散を行わず、エアセルが膨張し、
身体を起こしやすくなります。

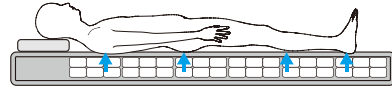


本製品は九州大学医学部 古江増隆教授と住友理工との共同研究を通じて
開発されたものです。


※ベッドフレームはシステムに含まれません。
スマートラバー、SRアクティブマットレスは住友理工株式会社の登録商標です。
体圧ボンさんは住友理工株式会社の商標です。

■ 仕様

アクティブマットレス本体

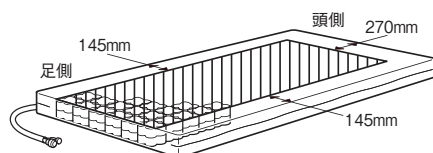

専用ポンプ

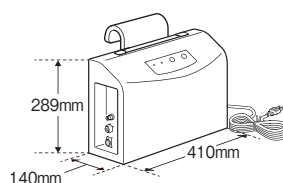

SRアクティブマットレス 体圧ブンさん (品番: MSZF831UL)

マットレス寸法	1890mm × 830mm × 150mm
折り曲げ位置	頭部から810mm
端座幅	145mm
端座高さ	150mm
端座部の材質	発泡ウレタン
エアセル駆動領域寸法	540mm × 1620mm
エアセルユニット幅	540mm/ エアセルユニットあたり
エアセルユニット長	270mm/ エアセルユニットあたり
エアセルユニット数	6個
エアセル数	18個/ エアセルユニットあたり
ポンプ数	1個

バルブユニット数	6個
排気専用バルブ	1個
アクティブマットレス本体重量	13kg
専用ポンプ重量	8kg
入力電源	AC100V
定格消費電力	20W
最大利用者体重	100kg
使用可能環境	温度: 5 ~ 35°C、湿度: 30 ~ 80%
保管可能環境	温度: -10 ~ 45°C、湿度: 30 ~ 85%
メーカー希望小売価格	¥698,000 (税抜)

■ 料金

レンタルコード	商品名	月額レンタル料	利用者負担額 (1割)	利用者負担額 (2割)	TAISコード
F107	体圧ブンさん (品番: MSZF831UL)	¥20,000	¥2,000	¥4,000	01378-000003