

楽しみながらバランス評価も できる新感覚パッド

福祉用具の活用で自立支援、
安全・安心な介護の実現

ABILITYES
アビリティーズ

トレーニング&評価パッド

トレアックスパッド



収納ケース付▶

- パッドに力を加えるとパッド先端のLEDインジケータが光ります。
- スケールモード（簡易評価・トレーニング）では、荷重評価とバランス評価がひと目でわかります。
- ランダムモードは、楽しみながらトレーニングに取り組むことができます。レクリエーションにもご利用いただけます。
- 手でも足でも使えます。ご利用者の体重や目的に合わせて、手は5~50kg、足は15~150kgの10段階に感度調節できます。
- 鉄製の壁に取り付けても使えます。



商品番号	種別
1300-20	6枚入り (緑、橙、紫) 各2枚
1300-21	3枚入り (緑、橙、紫) 各1枚

楽しみながらトレーニングができる2つのモード

1 スケールモード

簡易評価・トレーニング

荷重簡易評価
(重・軽)

■パッドへの負荷が大きくなるほど、パッド先端のインジケータがカラフルに光ります。

■手でも足でも使えます。

体重をどれだけ掛けられるか、保持できるかの評価やトレーニングができます。



バランス簡易評価
(左・右) (前・後)

■立位での左右の重心バランスが平衡な時は左右のインジケータの光り方が等しくなります。

■足で使います。



■前後の重心バランスが平衡な時はインジケータの中心が白く光ります。かかとや爪先寄りに重心が傾いている時はインジケータの左右が青く光ります。

■足で使います。



2 ランダムモード

トレーニング・レクリエーション

カラーマッチ
(色合わせ)

■パッドを踏むと、インジケータが緑・橙・紫のどれかに光ります。光った色のパッドを踏んでいきます。

■手でも足でも使えます。



クイックタッチ
(早押し)

■パッドのインジケータが光ったら、そのパッドを踏んでいきます。光が消えてしまう前にパッドを踏めたら、インジケータが瞬間白く光ります。

■手でも足でも使えます。

写真のように手で押してトレーニングすることもできます。



- 寸法 / 厚さ 2cm、左図参照 ●自重 (1枚あたり) / 1.25kg ●耐荷重 / 150kg
- 適正使用環境 (気温) / 5 ~ 35 度
- 電池 / 単 4 形電池 × 4
- ※電池は付属していません。

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

(無料通話) やさしいようぐを
0120-834490

お近くの当社営業所につながります

アビリティーズ・ケアネット株式会社

[本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

[営業所] 札幌市 / 仙台市 / 栃木市 / 川口市 / 渋谷区 / 葛飾区 / 武蔵野市 / 八王子市 / 千葉市 / 船橋市 / 横浜市 / 平塚市 / 松本市 / 名古屋市 / 新潟市 / 金沢市 / 大阪市 / 和泉市 / 西宮市 / 広島市 / 福山市 / 北九州市 / 福岡市 / 台北市 (台湾)

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

※このチラシの記載内容は 2021年3月のものです。 ※禁無断転載・複写

21-02-011XX